

## APPLICAZIONI

Sono indicati per esame, esplorazione, diagnostica, industria chimica e farmaceutica, laboratori di ricerca, officine meccaniche, stazioni di benzina, industria alimentare, imprese di pulizie.

## VANTAGGI

Senza polvere, non sterili, ambidestri, morbidi, resistenti, ipoallergenici

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite, prima dell'utilizzo verificare le condizioni del DPI, accertandosi del buono stato di conservazione e della mancanza di eventuali alterazioni (fori, lacerazioni e difetti visibili). Nel caso di difettosità, sostituire subito il guanto danneggiato. Il guanto conserva le sue caratteristiche solo se rimane perfettamente conservato, se ne viene fatto un uso corretto e se si effettua la corretta scelta della taglia. Conservare i guanti nell'imballo originario, in luogo fresco ed asciutto, al riparo da fonti di calore e raggi solari diretti. Il guanto è monouso, pertanto non può essere lavato né tantomeno riutilizzato. Trattandosi di D.P.I. monouso, si consiglia di sostituirli di frequente, per mantenere un grado di protezione ottimale.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### STANDARD NORMATIVI

Assenza di fori per AQL 1,5 (livello di ispezione G-1) in conformità alle norme UNI EN 455 Parte I. Materie prime e manifattura in conformità alle norme US FDA e Linee Guida GMP. Produzione in stabilimenti certificati EN ISO 9001 e EN ISO 13485. Proprietà fisiche in conformità a norme UNI EN 455 Parte II. Valutazione biologica in conformità a norme UNI EN 455 Parte III. Piano di campionamento in conformità a norme ISO 2859. Idoneità al contatto breve con alimenti per impiego nell'industria alimentare, acido acetico ed etanolo esclusi. Destinazione d'uso D.P.I. di I categoria ai sensi del D. Lgs. 475/92 in attuazione della Dir. CE 89/686 solo per rischi minori. Dispositivi medici di Classe I ai sensi del D. Lgs. 37/2010 in attuazione Dir. 2007/47/CE. Test di biocompatibilità conformi alle ISO 10993-10.

CE D.P.I. di I categoria ai sensi del D. Lgs. 475/92 in attuazione della Dir. CE 89/686 solo per rischi minori. Dispositivi medici di Classe I ai sensi del D. Lgs. 37/2010 in attuazione Dir.

2007/47/CE.

ASSORTIMENTO

Disponibile

nelle taglie S - M - L - XL